

beurer

EM 37



HU Hasizom-erősítő öv
Használati utasítás

CE

Tartalom

1. Ismerkedés a termékkel	2	6. Használat.....	6
2. Jelmagyarázat	2	7. Tisztítás	8
3. Fontos útmutatások.....	3	8. Műszaki adatok	8
4. A készülék ismertetése.....	5	9. Pót- és kopóalkatrészek	8
5. Üzembe helyezés	5	10. Garancia/szervíz	9

Tisztelt Vásárlónk!

Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy választása termékünkre esett. Cégünk kiváló minőségű és alaposan bevizsgált minőségi termékeket forgalmaz, amelyek az alábbi területeket ölelik fel: termoterápia, szelíd terápia, vérnyomás, testhőmérséklet, súly, masszázs és légterápia.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást, és tartsa be az abban foglalt tudnivalókat.

Baráti ajánlással
A Beurer-team

1. Ismerkedés a termékkel

A hasizom-erősítő öv működési elve

A hasizom-erősítő öv az elektromos izomstimulálás (EMS = EIS) elvén működik.

Az izomstimuláló gyenge elektromos impulzusokat kelt, amelyek az Ön bőrén keresztül eljutnak az izmokhoz. Az idegimpulzusok által történő természetes aktiváláshoz hasonlóan a hasizom-erősítő öv használata közben az izomrostok összehúzódnak, majd ismét ellazulnak. Tény, hogy itt az ingerlés aspecifikusabb, mint az aktív hasizom-erősítésnél és így a hasizom-erősítő öv használata nem pótolja teljesen a tényleges, aktív edzést.






Az elektromos izomstimulálást sok éve alkalmazzák izomerősítésre sport- és fitness-területen a edzett, karcsús és vonzó test elérésére. Alkalmazási területek pl.

- izomzat bemelegítése
- Izom-meghatározás
- izom- és bőrfeszesség fokozása
- izomlazítás

A rehabilitációnál is alkalmazzák az EMS-t. Ha valaki nyugalmi állapotra van kényszerítve, akkor a rendszeres izomstimulálás segít az inaktív testrészek mozgékonyságának és izomerejének megőrzésében. Így jelentősen lecsökkenhet a rehabilitációs idő. Mivel az inakat és ízületeket csak minimálisan terheli meg, ez az edzési módszer különösen kíméletes.

2. Jelmagyarázat

Az adattáblán a következő jeleket használjuk.

	Vegye figyelembe a használati útmutatót
	Olyan készülékek, amelyek átlagosan 10 mA vagy 10 V fölérti hatásos kimenő teljesítményt képesek leadni bármely 5 másodperces intervallumban.
	Gyártó
	Sorozatszám
	A készülék megfelel a 93/42/EEC irányelv követelményeinek

3. Fontos útmutatások

FIGYELEM!


Szakszerű használat

- Ezt a készüléket kizárólag arra a célra szabad használni, amelyre terveztük, mégpedig a használati útmutatóban ismertetett módon. A készülék mindennemű szakszerűtlen használata veszélyes lehet.
- Ha azon a testtájon, ahol a készüléket használja, ékszer vagy piercinget (pl. köldök-piercinget) visel, ezeket a készülék használatára el kell távolítani, ellenkező esetben pontszerű égésekre kerülhet sor.
- Ne használja a készüléket más olyan készülékekkel egyidejűleg, amelyek elektromos impulzusokat továbbítanak a testére (pl. TENS – készülékeket)!
- A készülék saját használatra, nem pedig gyógyászati vagy kereskedelmi célú alkalmazásra készült.
- A gyártó nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyeket a szakszerűtlen vagy helytelen használat okozott.
- Ha kétségei vannak, ne használja a készüléket, és forduljon a kereskedőhöz vagy a megadott címen az ügyfélszolgálathoz!
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal szabad használni.

Figyelem! Ritka esetben bőrirritációk léphetnek fel az elektródák tartományában.

Szakszerűtlen használat

– Nem szabad használni a készüléket:

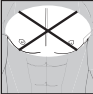- a fej területén: itt görcsrohamokat válthat ki
 - a nyak / nyaki ütőér területén: itt szív-működés-leállást válthat ki
 - a garat és a gége területén: itt izomgörcsöket okozhat, amelyek fulladáshoz vezetnek
 - a mellkas közelében: itt növelheti a kamra-fibrilláció kockázatát, és szívmegállást okozhat
- 
- Az esetleges veszélyek megelőzése érdekében tartsa távol a gyermekeket a készüléktől!
 - A készüléket 8 éves és annál idősebb gyerekek valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha a készülék biztonságos használatáról ismertették őket, és az abból eredő veszélyekkel tisztában vannak. Gyermek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználó általi karbantartást felügyelet nélkül hagyott gyerek nem végezheti.
 - Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól!
 - Ne használja a készüléket rövidhullámú vagy mikrohullámú készülékek (pl. mobiltelefon) közelében (1 m-en belül), mivel ezek befolyásolhatják a hatását.
 - Ne használja a készüléket fürdés vagy zuhanyozás közben! Ne tárolja vagy őrizze a készüléket olyan helyen, ahonnan beleeshet a fürdőkádba vagy a mosdóba!
 - A készüléket soha nem merítse bele vízbe vagy más folyadékokba!

Sérülés

- Gyakran ellenőrizze, hogy a készüléken nem mutatkoznak-e a kopás vagy sérülés jelei! Ha ilyen jeleket talál, vagy ha a készüléket szakszerűtlenül használta, újbóli használat előtt el kell vinnie a gyártóhoz vagy a kereskedőhöz.
- Azonnal kapcsolja ki a készüléket, ha megsérült, vagy ha üzemzavar történik!
- A javításokat csak a vevőszolgálattal vagy erre felhatalmazott kereskedőkkel végeztesse el!
- Ön semmilyen körülmények között se kísérelje meg a készülék javítását!



A saját biztonsága érdekében legyen óvatos!

A készüléket rendeltetése szerint csak egészséges felnőttek használhatják.

Az alább felsorolt esetekben semmi esetre sem szabad használni a készüléket:

- szívritmus-szabályozó
 - Fém implantátumok megléte esetén
 - szívritmus-zavarok
 - akut betegségek
 - epilepszia
 - rákos megbetegedések
 - bőrsérülések és vágások területén
 - terhesség
 - vérzésre való hajlam, pl. akut sérüléseknél vagy törésnél. Az ingert kiváltó áram vérzéseket válthat ki, vagy felerősítheti azokat.
 - olyan operációk után, amelyeknél a fokozott izom-összehúzódások zavarhatnák a gyógyulási folyamatot
 - nagyfrekvenciás sebészeti eszközre való egyidejű rácsatlakozás esetén
 - alacsony vagy magas vérnyomás
 - magas láz
 - pszichózis
 - dagadt vagy gyulladós területek.
 - akut vagy krónikus gyomor-megbetegedések esetén
- Kétséges esetben, kérdezze meg orvosát.

Az elemekkel kapcsolatos figyelmeztetések


- Ha az elemcella folyadék a bőrre vagy a szembe jut, az érintett területet öblítse le vízzel és forduljon orvoshoz.
-  **Fennáll a lenyelés veszélye!** A kisgyermek az elemeket lenyelhetik és azok fulladást okozhatnak. Ezért tartsa az elemeket kisgyermekektől elzárt helyen!
- Ügyeljen a pozitív (+) és negatív (-) polarításra.
- Ha az elem kifolyt, akkor húzzon védőkesztyűt, majd száraz ruhával alaposan tisztítsa meg az elemtartót.
- Védje az elemeket a túlzott hőtől.
-  **Robbanásveszély!** Ne dobja az elemeket tűzbe.
- Az elemeket nem szabad utántölteni, vagy rövidre zární.
- Ha hosszabb időn keresztül nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket az elemtartóból.
- Csak ugyanazt vagy egyenértékű elemtípust használjon.
- Az elemeket mindig egyidejűleg cserélje ki.
- Ne használjon akkumulátorokat!
- Az elemeket nem szabad szétszedni, kinyitni vagy feldarabolni.



4. A készülék ismertetése

A készülék részeinek elnevezése


1. Kezelőegység
2. LCD kijelző
3. Program- és leállító gomb
4. Intenzitásnövelő választógomb +
5. Intenzitáscsökkentő választógomb -
6. Be / Ki / Szünet gomb
7. Tartó
8. Elemtartó rekesz fedele
9. Felületi elektródák
10. Elektróda-csatlakozó borításai

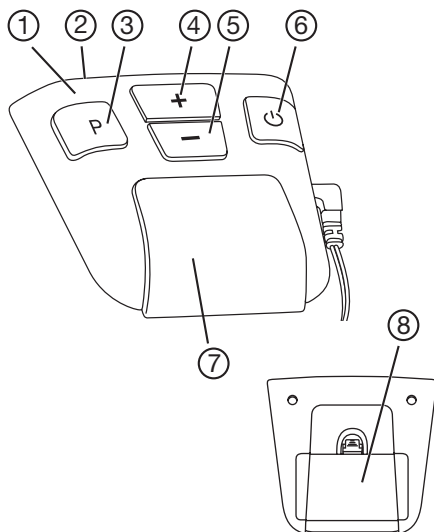

Soha ne tegye fel az övet csupasz fémelektrodákkal! Az elektródaábrítás nélküli öv használata sérülésekhez vezethet!

A kijelzési szimbólumok ismertetése

A Kulcs	billentyűzár aktiválva
B Szünetjel	villog, ha aktiválták a Szünet-et
C Elem- állapotjelző	villog, ha az elem lemerült
D Intenzitás	beállított intenzitási szint 0 - 40
E Program	kiválasztott program a már elvégzett edzési ciklusok számával
F Időmérő	az elindított program hátralévő ideje

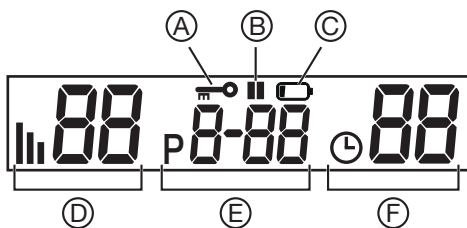


5. Üzembe helyezés

Elemek behelyezése

Ha a kijelzőn villog az „elem-szimbólum”, az elemek lemerültek, és ki kell őket cserélni. Az elemek behelyezéséhez vagy kicseréléséhez a kezelőegységet ki kell venni az öv tartójából.

- Húzza ki a készüléket felfelé a tartóból!
- Távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét.
- A jelölésnek megfelelően tegye be az elemeket az elemtartó rekeszbe! Ügyeljen az elemek helyes polaritására!

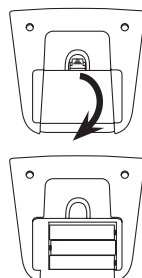

Tudnivalók:

- Ehhez a készülékhez nem lehet akkukat használni.
- Ha nem használja a készüléket, azt javasoljuk, hogy a készüléket és az övet külön tárolja!
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, azt ajánljuk, hogy előzőleg vegye ki belőle az elemeket!
- Az elhasznált, teljesen lemerült elemeket a külön megjelölt gyűjtőtartályokba helyezve, gyűjtőhelyeken vagy az elektromos boltokba leadva ártalmatlanítsa. Az elemek ártalmatlanítására törvény kötelezi.

– A káros anyagot tartalmazó elemeken a következő jelölések szerepelnek:

Pb = az elem ólmot tartalmaz,

Cd = az elem kadmiumot tartalmaz,

Hg = az elem higanyt tartalmaz.

– Környezetvédelmi érdekekből a készüléket az élettartamának lejárta után nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni. Az ártalmatlanítást az Ön országának megfelelő gyűjtőhelyein kell elvégezni. A készüléket az Európai Uniónak az elhasználdott elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) jelű irányelve szerint ártalmatlanítsa. Esetlegesen további kérdéseivel forduljon a hulladékkezelésben illetékes helyi szervekhez.



Az öv felhelyezése

Minden edzés előtt biztosítsa, hogy a bőre tiszta legyen, és ne legyen rajta krém vagy olaj! Csak így működhet a készülék optimálisan.

– Tegye az övet maga elé úgy, hogy az elektródák Ön felé irányuljanak!

– Nedvesítse meg az elektródákat és hasát vízzel. Ügyeljen arra, hogy az elektródák felületei egyenletesen legyenek benedvesítve, hogy a pontoszerű feszültségcsúcsokat a későbbi edzés során bőrén elkerülje.

– Helyezze az övet a dereka köré úgy, hogy az elektródák a hasára feküdjenek! Ezután zárja le a tépőzárát!

Ügyeljen rá, hogy az elektróda és a bőr közötti jó érintkezés érdekében elég szorosan felfeküdjön, de ne vágjon be!

Ha az öv az Ön derékbőségéhez nem volna elegendő, használja a mellékelt hosszabbítót.

Hol szabad kizárólag használni az övet:

Kizárólag a has köré helyezze fel az övet! A köldök központosan legyen fedve!



Automatikus kikapcsolás

Ha a készüléket bekapcsolás után nem használja, akkor 5 perc után automatikusan kikapcsol.

6. Használat

Általánosságban a hasizom-erősítő övvel végzett edzésről

Az első héten csak legfeljebb naponta egyszer használja a hasizom-erősítő övet, hogy izmai fokozatosan szokjanak hozzá a készülékhez! Attól fogva gyakrabban is edzhet.

Figyelem! Az edzésegységek között legalább 5 óra nyugalmi időt kell hagyni, hogy izmai regenerálódhassanak.

Az edzés intenzitását hozzáigazíthatja a saját erőnléti állapotához. Azt javasoljuk azonban, hogy lépésről lépésre futtassa le az egyik programot a másik után! Az A – E programok úgy vannak összehangolva egymással, hogy izmainak elegendő idejük maradjon arra, hogy minden használatnál alkalmazkodjanak egy intenzívebb edzéshez. Az A – E programok a frekvencia és az edzés-impulzusok, valamint az edzés-impulzusok közötti szünetek időtartama tekintetében térnek el egymástól.

A készülék úgy van beállítva egy edzési javaslattal, hogy egymás után lefut az A – E program, és minden program különböző gyakorisággal megismétlődik. Ön azonban önállóan is kiválaszthatja magának a programot.

Így edz helyesen

Mit érez edzés közben

Az edzés kezdetén egy enyhe bizsergést érez. Az intenzitás növekedésével izom-összehúzódasokat érez az elektródák környezetében és közvetlenül alattuk.

Minden összehúzódás lassú feszültségnövekedéssel kezdődik, ez a beállított intenzitáson néhány másodpercig fennmarad. Az izmok ezután ismét ellazulnak.

A készülék bekapcsolása

Nyomja meg a Be / Ki gombot! Felhangzik egy rövid jelzés, és az LCD kijelző kivilágosodik. A készülék első indításakor automatikusan aktiválódik az A program.

Programválasztás

A hasizom-erősítőnek öt egymással összehangolt programja van, amelyet több hetes edzési idő alatt futtathat végig. Az első héten az A programmal kell kezdeni alacsony szinten, majd izmainak fokozódó erősödésével növelheti az edzés intenzitását. A hasizom-erősítő úgy van beállítva, hogy egy meghatározott számú edzési ciklus után automatikusan átállítja magát a következő erősebb programra. Ön azonban saját maga is megválaszthatja a programot a jó közérzetétől és az erőnléti állapotától függően.

Az edzési ciklusok figyelembe vétele

Minden edzés három fázisból áll:

- egy kétperces bemelegítési fázisból (30 Hz), amely alatt az izmok felkészülnek az edzésre
- egy edzési fázisból (az edzésprogramtól függően különböző frekvenciával)
- egy kétperces lazítási fázisból (30 Hz), amely alatt az izmok ismét ellazulhatnak

Program	Időtartam [perc]	Ismétlések	Edzési frekvencia [Hz]
A	22	4	45 / 60
B	22	4	60 / 80
C	22	8	45
D	31	16	60
E	31	folyamatosan	80

Intenzitási szint beállítása

Ütmutatás: Az intenzitást csak akkor lehet beállítani, ha az elektródák érintkeznek a bőrrrel.


Minden edzés kezdetén be kell állítania az intenzitási szintet. Nyomja meg az + intenzitásbeállító gombot az intenzitás növeléséhez és az - intenzitásbeállító gombot az intenzitás csökkentéséhez!

Az intenzitástól függően először bizsergést, később izom-összehúzódást fog érezni. Az intenzitást csak olyan mértékűre állítsa be, ami még kellemes az Ön számára!

A túl erős impulzusok leállítás

Bármikor csökkentheti az intenzitást, vagy a Be / Ki gomb megnyomásával (~ 2 másodperc) ismét ki-kapcsolhatja a készüléket. Ha az övet elhúzza a hasától, úgy hogy az elektróda-tartományban már nincs érintkezés a bőrrrel, az intenzitás szintje automatikusan nullára esik vissza. Ha újból érintkezésbe kerül a bőrrrel, már nincs feszültség.

A nemkívánatos impulzusváltozások megakadályozása

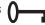Az edzés közbeni véltetlen impulzusnövekedés elkerülésére egyszerűen kapcsolja be a billentyűzárát! Ehhez kb. 3 másodpercig nyomja a programbeállító gombot! Megszólal egy hangjelzés, és a kijelzőn megjelenik a "  " jel. A billentyűzár feloldásához újra nyomja meg a gombot!

Reagálás a kellemetlen érzetekre

Ha szúrást vagy viszketést érez a bőrrén, vagy ha az izom-összehúzódások helyett csak egy bizsergést érez, kapcsolja ki a készüléket, és a következőképpen járjon el:

- Ellenőrizze, hogy az elektródák rendben vannak-e vagy nem sérültek-e meg!
- Ellenőrizze, hogy megvan-e még a kerek borítás az elektróda-csatlakozások fölött!
- Vegye le az övet, és még egyszer teljesen nedvesítse be!
- Az újbóli felrakásnál ügyeljen a jó bőrérítkezésre és a jó benedvesítésre!

Szünet beiktatása edzés közben

Ha egy program közben szünetet szeretne, röviden nyomja meg a szünet-gombot! Megszólal egy hangjelzés, és a kijelzőn megjelenik a „II” szünetjelzés. A gomb ismételt megnyomásával folytathatja a programot.

Az edzésgyakorlás leolvasása

A kijelzőn leolvashatja az edzésgyakorlását. A programok mögötti számok azt mutatják, hányszor végzett már el teljesen egy-egy programot. Ezeket a számokat a készülék az elemcseréig tárolja.

A tartozékkészletek segítségével (nem része a szállítási terjedelemnek) lehetősége nyílik két öntapadó elektródát a kezelőegységre csatlakoztatni.

A tartozékkészletet ügyfélszolgálatunkon keresztül, a 647.05-ös cikkszámmal érheti el.

A sokoldalú izomstimuláció használatához az alábbiak szerint járjon el:

1. Távolítsa el a csatlakozókábelt és az öntapadó elektródákat a tartozékkészletből.
2. Csatlakoztassa a csatlakozókábelt az öntapadó elektródákhoz.
3. Dugja a csatlakozókábel dugaszát a kezelőegység oldalsó aljzatába.

Kérjük, vegye figyelembe a tartozékkészletre vonatkozó használati tudnivalókat.

7. Tisztítás

- Minden tisztítás előtt vegye ki az elemeket a készülékből!
- A készüléket egy enyhén megnedvesített ruhával tisztítsa meg! Makacsabb szennyeződés esetén a ruhát enyhe szappanos vízzel is megnedvesítheti.
- Ügyeljen, hogy a készülék ne essen le!
- Ügyeljen rá, hogy ne hatoljon be víz a készülékbe! Ha ez mégis előfordulna, csak akkor használja újra a készüléket, ha az teljesen megszáradt!
- A tisztításhoz ne használjon vegyszereket vagy súrolószert!
- Ha a készüléket (kezelőegységet) levette az övről, az övet kézmeleg vízben lemoshatja. Ehhez enyhe szappanos vizet vagy folyékony mosószert használjon! Ne használjon fehérítőszert!
- Az övet nem lehet mosógépben mosni.

8. Műszaki adatok

Modell:	EM 37
Áramellátás:	3 db 1,5 V AAA (LR 03 típus)
Elektródaméret:	kb. 11,5 x 6,5 cm / 10 x 9 cm
Paraméter (500 ohm terhelés):	– Kimenő feszültség: max. 70 V p-p – Kimenő áram: max. 140 mA p-p – Kimenő frekvencia: 30 – 80 Hz
Impulzus-időtartam:	200 µs fázisonként
Hullámforma:	szimmetrikus, kétfázisú négyszögforma
Súly:	~ 330 g (elemek és hosszabbító nélkül)
Övméret	kb. 70 – kb. 140 cm derékbőrségre
maximális megengedett üzemi feltételek:	10 °C - +40 °C, 20-65% relatív páratartalom
maximális megengedett tárolási feltételek:	0 °C - +55 °C, 10-90% relatív páratartalom

Aktualizálási okokból fenntartjuk magunknak a jogot a műszaki adatok értesítés nélküli módosítására.

9. Pót- és kopóalkatrészek

A pót- és kopóalkatrészeket az adott szerviz címén a megadott anyagszámmal szerezheti be.

Megnevezés	Cikk-, ill. rendelési szám
Tartozékkészlet	647.05

10. Garancia/szerviz

Szavatosság tekintetében forduljon kereskedőjéhez vagy helyi képviselőjéhez (lásd a „Service international” listát).

A készülék visszaküldése esetén csatoljon egy másolatot a vásárlást igazoló nyugtáról, és a hiba rövid leírását.

A következő garanciális feltételek érvényesek:

1. A BEURER termékekre vonatkozó jótállási időtartam 3 év, vagy – amennyiben hosszabb – a mindenkor helyi szavatossági időtartam a vásárlás napjától kezdődően.
Szavatossági igény esetén a vásárlás dátumát nyugta vagy számla útján kell igazolni.
2. Javítások esetén (a készülék egészére vagy annak részeire vonatkozóan) a jótállási időtartam nem hosszabbodik meg.
3. A jótállás nem vonatkozik a következőkből eredő károkra:
 - a. szakszerűtlen kezelés, pl. a használati utasítás figyelmen kívül hagyása.
 - b. az ügyfél vagy nem jogosult személy által végrehajtott javítások vagy módosítások.
 - c. a gyártótól az ügyfél felé vagy az ügyféltől a Servicecenterig történő szállítás során bekövetkező károk.
 - d. A jótállás nem vonatkozik tartozékokra, amelyek tartós használatnak vannak kitéve (mandzsetták, elemek stb.).
4. A készülék meghibásodásából eredő károkért való felelősség akkor is kizárt, ha maga a jótállási igény helytálló.

